




HETI Desipesu Pro

Desinfioiva puhdistusaine, hajustamaton.

1 L, 5 L

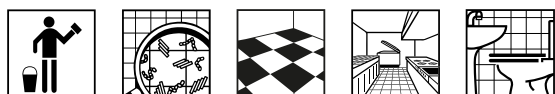

Tuotekuvaus

HETI Desipesu Pro on aldehyditön, erittäin suorituskykyinen pintojen desinfioiva puhdistusaine, jolla on laaja teho bakteereja, hiivoja ja viruksia vastaan. Soveltuu pintojen puhdistamiseen ja desinfiointiin esim. sauna- ja suihkutiloissa, ammattikeittiöissä ja ravintoloissa, kaupoissa, kouluissa, elintarviketiloissa, urheilutiloissa, sairaaloissa, hoitolaitoksissa ja terveydenhuollon laitoksissa. HETI Desipesu Pro on biosidi, jonka desinfioiva teho perustuu kvaternäärisiin ammoniumyhdisteisiin (DDAC).

Käyttö

- Laimenna käyttökohteen ja vaaditun tehon mukaan.
- Levitä koviin pinnoille pyyhkimällä, moppaamalla tai suihkuttamalla/vaahdottamalla. Varmista, että pinta on täysin märkä moppaus- tai pyyhkimisvaiheen jälkeen.
- Eläinlääketieteellistä pintadesinfiointia varten suihkuta laimennettua tuotetta desinfioitavalle pinnalle ja jätä tarvittava vaikutusaika.
- Desinfioidut pinnat, jotka voivat joutua kosketuksiin elin- tarvikkeiden kanssa, on huuhdeltava juomakelpoisella vedellä.
- Tuote ei sovellu linoleumille, vahatuille pinnoille, eloksoidulle alumiinille eikä nikkeliyhdisteille
- Saattaa värjätä muoveja suurissa pitoisuuksissa

pH käyttöliuos 11 tiiviste 13

Annostelu

Ylläpitopuhdistukseen 5-10 ml/l

Desinfioivaan puhdistukseen 10 - 60 ml/l

Koostumus

2-Aminoethanol Didecyldimethylammonium chloride Potassium carbonate Propan-2-ol

EN-testit

Kauppojen, koulujen, urheilutilojen, saunojen ja suihkujen ym desinfiointiin (PT2)

- 1% (10ml/l), 2 min., Bactericidal (EN1276, EN16615)



Berner Oy
Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki
+358 20 690 76 | medlab@berner.fi | bernermedical.fi

Bröderna Berner AB, Berner Medical
Bergkällavägen 27 A, 192 79 Sollentuna
+ 46 8 446 15 06 | info.medical.se@bernercompany.com | bernermedical.se

EN-testit

- 2% (20ml/l), 1 min., Bactericidal (EN1276, EN16615), Yeasticidal (EN1650, EN16615)
- 4% (40ml/l), 5 min., Bactericidal (EN1276, EN16615), Yeasticidal (EN1650, EN16615), Virucidal against Enveloped Viruses (EN14476, EN16777)

Terveysthuollon pintojen desinfiointiin (PT2)

- 2% (20ml/l), 5 min., Bactericidal (EN13727, EN16615), Yeasticidal (EN13624, EN16615)
- 4% (40ml/l), 1 min., Bactericidal (EN13727, EN16615), Yeasticidal (EN13624, EN16615)

Eläinlääketieteellisten pintojen desinfiointiin (PT3)

- 6% (60ml/l), 30 min., Bactericidal (EN1656, EN14349), Yeasticidal (EN1657, EN16438)

Elintarvikkeiden pintojen desinfiointiin (PT4)

- 2% (20ml/l), 1 min., Bactericidal (EN1276, EN16615), Yeasticidal (EN1650, EN16615)
- 4% (40ml/l), 5 min., Bactericidal (EN1276, EN16615), Yeasticidal (EN1650, EN16615), Virucidal against Enveloped Viruses (EN14476, EN16777)

Kokonaissäilyvyysaika valmistuksesta

3 vuotta

Kokonaissäilyvyysaika avaamisesta

1 vuosi

Valmistusmaa

Suomi

Valmistaja

Berner Oy

Kierrätysohjeet

Tuotetta ei saa laskea laimentamattomana vesistöön tai maaperään. Pienet määrät voidaan tarvittaessa hävittää laimennettuna viemäriverkon kautta. Suuret määrät hävitetään paikallisen jätehuoltoviranomaisen ohjeiden mukaisesti. Pakkausmuovi soveltuu kierrätykseen. Kanisteri, pullo ja etiketti on uusiokäyttöön soveltuvaa PE-muovia. PE-muovi voidaan myös hyödyntää materiaali kierrätykseen sekä energiatuotannossa.

Pakkaustiedot

	Tuotenumero	Myyntierä	Lava	EAN vähittäispakkaus	EAN kuljetuspakkaus
1 L	1000000583	8 kpl	336 kpl	6414505178579	6414505178586
5 L	1000000584	3 kpl	108 kpl	6414505178609	6414505178616

SUMI-kortit



Berner Oy
Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki
+358 20 690 76 | medlab@berner.fi | bernermedical.fi

Bröderna Berner AB, Berner Medical
Bergkällavägen 27 A, 192 79 Sollentuna
+ 46 8 446 15 06 | info.medical.se@bernercompany.com | bernermedical.se

SUMI-kortit

SUMI-kortti PW_10_1_FI • SUMI-kortti PW_11_3_G_FI • SUMI-kortti PW_19_2_G FI • SUMI-kortti PW_8a_1_G_FI



Berner Oy
Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki
+358 20 690 76 | medlab@berner.fi | bernermedical.fi

Bröderna Berner AB, Berner Medical
Bergkällavägen 27 A, 192 79 Sollentuna
+ 46 8 446 15 06 | info.medical.se@bernercompany.com | bernermedical.se



1L



5L