



Kiilto Pro Hydragel

Esikäsittelyaine



Orgaanisen lian ja eritteiden kuivumista ja leviämistä estävä esikäsittelyaine instrumenteille.

Käyttökohteet

Esikäsittelyaine tilanteisiin, joissa instrumentteja ei pestä välittömästi käytön jälkeen.

Lääkinnällinen laite. Ammattikäyttöön.

Tuuteominaisuudet

Helposti levittyvä geelimäinen suihke muodostaa instrumenttien pinnalle kalvon, joka estää orgaanisen lian ja eritteiden kuivumisen helpottaen puhdistamista. Käsitellyt instrumentit tulee pestä 5 vuorokauden sisällä. Sopii yleisesti käytössä oleville instrumenttimateriaaleille. Hydragel on vesiliukoinen ja huuhtoutuu hyvin instrumenttien pinnalta.

Käyttö- ja annostusohje

Käytä kannellista säilytys/kuljetuslaatikkoa. Sumuta esikäsittelyainetta kuljetuslaatikossa olevien instrumenttien päälle. Noudata turvallisia työtapoja instrumenttien säilytyksen ja kuljetuksen aikana. Pese instrumentit normaaliin tapaan.

Huomioitavaa

Esikäsittelyaineen alle ei saa jäädä kemikaaleja, jotka voivat syövyttää tai vaurioittaa metalleja. Noudata laitevalmistajien erikoisohejeistuksia. Puhdista roiskeet vedellä. Lue käyttö- ja suojausohjeet käyttöturvallisuustiedotteesta.

Koostumus

Tehoaine

Ionittomia tensidejä < 5%

Saippuaa < 5%

Säilöntäainetta

Korroosionestoainetta

Tuotteen pH

9.0 heikosti emäksinen

Varastointi

<28°C. Säilyy 3 v. valmistusajankohdasta.

Valmistusmaa

SUOMI

Käyttö- ja ympäristöturvallisuus

Hydragel esikäsittelyaineeseen liittyvistä mahdollisista vakavista vaaratilanteista tulee ilmoittaa valmistajalle asiakaspalvelu@kiilto.com ja lääkinnällisistä laitteista vastaavalle viranomaiselle (Suomessa Fimea).

Tuote on biologisesti hajoava. Raaka-aineet ovat ympäristömyönteisiä. Pakkaukset valmistetaan PE-HD -muovista, joka on ympäristömyönteinen, täysin kierrätyskelpoinen ja poltettava materiaali.

Pakkauskoko / Tuotekoodi	Myyntierä	Tuotekoodi	GTIN	Myyntierän GTIN
	6 x 750 ml	8222	6417964082227	6417964482959



Lisätietoja

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiilto.fi tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiilto.com.