



Sekumatic® OXIVARIO®

Nestemäinen pesutehostin koneelliseen instrumenttien pesuun

Pesutehostin kirurgisten ja MIC-instrumenttien sekä jäykkien endoskooppien puhdistukseen OXIVARIO®- ja OXIVARIO® Plus- prosesseissa

Käyttöalue:

- Sekumatic® OXIVARIO® puhdistaa tehokkaasti vaikeaakin proteiiniliikaa.
- Sekumatic® OXIVARIO® ei sovellu käytettäväksi instrumenteille, joissa on titaanipäällyste ja/tai alumiiniseoksia.
- Sekumatic® OXIVARIO® :ta voidaan käyttää kaikissa vedenkovuuksissa.

Annostelu/käyttö:

- Lääketieteellisessä puhdistus- ja desinfiointi-käytössä tuotetta annostellaan 5-10 ml/l. Annostelu tapahtuu toisessa puhdistusvaiheessa.

OXIVARIO® Plus-prosessi: Annostele

3,5 ml/l Sekumatic® OXIVARIO®:ta

5 ml/l Sekumatic® Multiclean:ia.

OXIVARIO® Plus-prosessi: Annostele

7 ml/l Sekumatic® OXIVARIO®:ta

8 ml/l Sekumatic® Multiclean:ia.

Toisen puhdistusvaiheen jälkeen tapahtuvan huuhtelun yhteydessä neutraloidaan ylimääräinen emäs Sekumatic® FNZ:alla, jota annostellaan 1-3 ml/l.

Sekumatic® OXIVARIO®/Sekumatic® MultiClean-liuos huuhdellaan huolellisesti vaikutusajan jälkeen.

Loppuhuuhteluun ja lämpödesinfiointiin suositellaan käytettäväksi demineralisoitua vettä.

pH-arvo:

- Konsentraatti: 3

Ulkonäkö:

- Väritön neste

Pakkauskoko:

- Kartonki 3 x 2,8 l kannu

Varastointi:

- Säilytetään alkuperäispakkauksessa huoneenlämmössä enintään +25 °C:ssa

Kemiallis-fyysiset tiedot:

- Tiheys:(20 °C) 1,11 g/ml
- pH-arvo:(20 °C) n. 3 (konsentraatti)
- pH-arvo:(20 °C) (3,5 ml/l) 6,5 demivesi

Turvallisuusohjeet:

- Katso käyttöturvallisuustiedote