



Suma Med Enzyme

Entsyymiä sisältävä nestemäinen sairaalainstrumenttien pesuaine

Kuvaus tuotteesta

Neutraali, CE-merkitty proteaasientsyymiä sisältävä nestemäinen pesuaine sairaalainstrumenttien pesuun pehmeässä ja keskikovassa vedessä. Soveltuu käytettäväksi ultraäänipesulaitteissa ja endoskooppien pesukoneissa.

Ominaisuudet

- CE-merkitty Suma Med Enzyme on kehitetty erityisesti sairaalavälineiden pesuun.
- Tuote soveltuu käytettäväksi sekä pesu- ja desinfektiolaitteissa että käsin suoritettavassa pesussa. Voidaan käyttää myös liotukseen.
- Sisältää valkuaista hajottavaa entsyymiä, joka varmistaa erinomaisen puhdistustuloksen pehmeässä, ja keskikovassa vedessä (2-8 °dh).

Edut

- Irrottaa kiinni kuivuneen lian.
- Neutraali tuote on turvallinen käytössä.
- Soveltuu alkaliherkille materiaaleille (vaikuttavana aineena entsyymi).
- Tiivistetty tuote on taloudellinen käytössä.
- CE-merkitty.

Käyttöohje

A. Automaattinen puhdistus:

1. Huuhtelee ja kuivaa lääkinnälliset laitteet huolellisesti ennen käyttöä.
2. Aseta lääkinnälliset laitteet automaattiseen mekaaniseen puhdistuskoneeseen.
3. Annostus: 2-6 ml/l* paikallisista olosuhteista riippuen käytetään automaattista annostelua.
4. Aloita pesuohjelmat 20-25 °C:ssa ennen viimeistelyä korkeammassa lämpötiloissa.

B. Manuaalinen esiliotus:

1. Valmistetaan liuos, jossa on 5-7 ml / l* Suma Med -entsyymiä, manuaalinen tai automaattinen annostus.
2. Aseta lääkinnälliset laitteet liuokseen ja anna sen liota 10 minuuttia.
3. Lääkinnälliset laitteet voidaan nyt puhdistaa helposti tavanomaisilla puhdistusmenetelmillä (kuten kohdassa A on kuvattu)

Kuivaa lääkinnällinen laite ennen käyttöä. Ilman asianmukaista sterilointia sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi invasiivisissa lääkinnällisissä laitteissa, jotka tunkeutuvat kudokseen tai verenkiertoon eivätkä joudu suoraan kosketukseen ehjien limakalvojen kanssa. Suojalaseja ei yleensä tarvita. Niiden käyttöä suositellaan kuitenkin tapauksissa, joissa roiskeita voi esiintyä tuotetta käsiteltäessä.

Annostus*

Annostus 3 - 6 g/l. Annostus vaihtelee laitevalmistajakohtaisesti koneen käyttämän pesuveden määrän mukaan. Ultraäänipesukoneissa annostus 3 g/l yleensä riittää. Entsyymi hajoaa korkeissa lämpötiloissa ja paras pesutulos saadaan, kun lämpötila on alle 50 °C. Käsimenetelmissä annostus 0,5 - 1 %.

**Tämä annostus on optimaalisten olosuhteiden mukainen, suositukset voivat vaihdella. Ota yhteyttä Diversey-edustajaasi saadaksesi lisäohjeita.*

Menetelmä

Huuhtelee ja kuivaa kädet käytön jälkeen. Suojakäsineiden ja kosteusvoiteen käyttö on suositeltavaa.



 Diversey Europe
Operations B.V.
Maarssebroeksedijk 2,
3542 DN Utrecht,
The Netherlands





Suma Med Enzyme

Tekniset tiedot

Ulkonäkö: Kirkas vaaleankeltainen neste
pH-arvo (laimentamaton): ≈ 7
pH-arvo (käyttöliuos): ≈ 7 (0.6 %)
Suhteellinen tiheys (20°C): ≈ 1.13

Yllä olevat tiedot ovat tyypillisiä normaalituotannossa. Niitä ei voi käyttää ohjeavoina.

Käyttöturvallisuus ja varastointi

*** please contact Henk-Jan to provide your translation for this new standard sentence on CE-marked PIS's ***

Varoitus

Jos Suma Med Enzyme:n käyttöön liittyy vakava vaaratilanne, käyttäjän on ilmoitettava siitä paikalliselle Diversey-yhteyshenkilölleen ja sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa käyttäjä ja/tai potilas asuu.

Säilytä 6-35 °C:n lämpötilassa. Jos Suma Med -entsyymien käyttöön liittyy vakava vaaratilanne, käyttäjän tulee ilmoittaa siitä paikalliselle Diverseyn toimistolle ja sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, johon käyttäjä ja/tai potilas on sijoittautunut. Älä käytä uudelleen. Tuotetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ihmisen iholle. Suma Med -entsyymejä ei ole tarkoitettu käytettäväksi huokoisissa lääkinällisissä laitteissa. Ei saa käyttää polyeteenitereftalaatista (PET) valmistetuissa lääkinällisissä laitteissa. Ilman asianmukaista sterilointia tuotetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi invasiivisissa lääkinällisissä laitteissa, jotka tunkeutuvat kudokseen tai tunkeutuvat verenkiertoon eivätkä joudu suoraan kosketukseen ehjien limakalvojen kanssa. Älä käytä Suma Med -entsyymejä muovisissa lääkinällisissä laitteissa. Muita kuin tunnistettuja käyttötarkoituksia ei suositella. Pese kädet ennen taukoja ja työpäivän päätteeksi. Pese kasvat, kädet ja paljaana oleva iho huolellisesti käsittelyn jälkeen. Poista välittömästi kaikki saastuneet vaatteet. Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita tarpeen mukaan. Käytä vain riittävällä ilmanvaihdoilla. Ehkä syövyttävä metalleille.

Henkilösuojaimet

Suosittelut turvatoimenpiteet laimentamattoman tuotteen käsittelyyn: Kattaa toiminnot, kuten täyttö ja tuotteen siirtäminen levityslaitteisiin, pulloihin tai kauhoihin.

	Henkilönsuojaimet
Silmien/kasvojen suojaus	Suojalaseja ei yleensä tarvita. Niiden käyttöä suositellaan kuitenkin tapauksissa, joissa tuotetta käsiteltäessä voi esiintyä roiskeita (EN 166).

Suosittelut turvatoimenpiteet laimennetun valmisteen käsittelyyn:

Ei erityisvaatimuksia normaaleissa käyttöolosuhteissa.

Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

Tiivistetty sisältö tai saastunut pakkaus on hävitettävä sertifioitujen käsittelijän toimesta tai laitosluvan mukaisesti. Jätteiden päästämistä viemäreihin ei suositella. Puhdistettu pakkausmateriaali soveltuu energian talteenottoon tai kierrätykseen paikallisen lainsäädännön mukaisesti.

Euroopan jäteluettelo: 20 01 30 - muut kuin nimikkeessä 20 01 29 mainitut pesuaineet.

Tyhjät pakkaukset Suositus: Hävitä kansalliset tai paikalliset määräykset.

Sopivat puhdistusaineet: Kastele tarvittaessa puhdistusaineella.

Yhteensopivuus

Suma Med Enzyme sopii useimmille sairaaloissa tavattaville materiaaleille, kun sitä käytetään ohjeen mukaisesti.

Ympäristötiedot

Valmisteen sisältämät pinta-aktiiviset aineet täyttävät pesuaineista annetun (EU):n asetuksen N:o 648/2004 mukaiset biologisen hajoavuuden kriteerit.

www.diversey.com

© 2024 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 30/08/2024 fi-FI (P01150)