

Topmatic Clinil

Erikoispesuaine pesu- ja huuhteludesinfektiolaitteisiin, koneelliseen pesuun ja liotukseen

OMINAISUUDET

Topmatic Clinil on erikoispesuaine instrumenttien, pesuvatien, kaarimaljojen, bidé - astioiden yms. pesuun. Topmatic Clinil soveltuu käytettäväksi sekä huuhtelu- että pesuperiaatteella toimivissa desinfiointilaitteissa sairaaloissa, vanhainkodeissa yms. Ei sovellu pehmeille metalleille.

PESUAINEASETUS 648/2004
MUKAISESTI SISÄLTÄÄ
<5% polykarboksylaattia

pH-ARVO
12,75 – 12,85 (100%)
Käyttöliuos: 11,5

KÄYTTÖ

Topmatic Cliniliä käytetään pesukoneen automaattisen annostelulaitteen avulla. Aseta annostelijasta tuleva imuletku Topmatic Clinil -astiaan, jonka jälkeen annostus tapahtuu automaattisesti.

- Pese täysiä koneellisia aina kun mahdollista
- Pese alhaisimmassa lämpötilassa, jolla saadaan hygieeninen lopputulos.

- Vältä yli- tai aliannostelua.
- Huuhtele tyhjä pakkaus ja hävitä pakkaus kierrättämällä se kovana muovina.

ANNOSTUS

Alkaen 0,4 g/vesilitra. Annostelu tapahtuu automaattisen annostelulaitteen avulla. Tarvittava annostus vaihtelee mm. astianpesukoneen teknisen kunnon ja paikallisten vesiolosuhteiden mukaan. Ecolabin asiantuntija säättää annostuksen asiakaskohtaisesti ja opastaa astiahuollon prosessissa, jotta prosessin kokonaiskustannukset voidaan minimoida.

VARASTOINTI

Säilytetään suljettuna normaalissa huoneen lämpötilassa.

PAKKAUSKOKO

3 x 5 l