

Oxivir Plus

Desinfiioiva puhdistusaine

Kuvaus tuotteesta

Ympäristömyötäinen ja käyttäjäystävällinen Oxivir Plus on pesevä desinfektioaine, joka perustuu kiihdytetyn ja stabiloidun vetyperoksidin patentoituun teknologiaan. Tuote on CE IIa-merkitty, soveltuu lääkinnällisten välineiden ja laitteiden, vettä sietävien pintojen pesuun ja desinfektioon sekä eritetahradesinfektioon. Tehoa myös viruksiin. Tuotteella on PT2- ja PT4-hyväksyntä.

Ominaisuudet

- Teho viruksiin, bakteereihin, hiivoihin ja itiöihin on osoitettu EU-normien mukaisesti.
- Säilyvyys tiivisteenä 2 vuotta valmistuksesta.
- Puhdistaa ja desinfiioi samanaikaisesti vähentäen tarvittavaa työaika.
- Soveltuu laajalti erilaisiin kohteisiin terveydenhuollon vaativista olosuhteista keittiö- ja mm. kosteiden tilojen desinfiioivaan puhdistukseen.

Edut

- Käyttäjälle turvallinen ja helppo käyttää.
- Tavanomaisiin desinfektioaineisiin verrattuna tuote on ympäristömyötäisempi.
- Soveltuu kevytmetallipintojen puhdistukseen (mm. alumiini).
- Herkkiä materiaaleja käsiteltäessä noudata laitevalmistajan ohjeita sekä testaa tuotteen soveltuvuus.
- Mikrokuitupyhkeen käyttö lisää tuotteen puhdistustehoa.
- Kestää likarastusta ja emulgoi erinomaisesti ihorasvaa.
- Ei valkaise eikä jätä puhdistettaville pinnoille raitoja.
- Ehkäisee kalkkikiven muodostusta.
- Soveltuu tekstiilipintojen desinfiioivaan puhdistukseen.
- Soveltuu myös aroille tekstiileille, Wool Safe-hyväksyntä.

Käyttöohje

Pintadesinfektio, puhtaat pinnat: 10 ml + 990 ml vettä (1 %). Pyyhi pinta huolellisesti käyttöliuokseen kostutetulla siivospyyhkeellä.

Pintadesinfektio, likaiset pinnat: 35 ml + 965 ml vettä (3,5 %). Märkäpyyhintä tai kosteapyyhintä. Pyyhi pinta huolellisesti liuokseen kostutetulla siivospyyhkeellä.

Pintadesinfektio (cl.diff.): 150 ml + 850 ml vettä (15 %).

Eritetahradesinfektio: 35 ml + 965 ml vettä (3,5 %). Levitä liuos tahraan ja pyyhi tahrat pois.

Tekstiilipintojen desinfiioiva puhdistus: 35 ml + 965 ml vettä (3,5 %). Poista irtolika tai erite. Annostele liuosta suoraan tahralle ja poista se pehmeällä harjalla tai siivospyyhkeellä. Etene tahrann keskusta kohden.

Imeytä liuennut tahrat paperiin tai siivospyyhkeeseen. Huuhtelee pinta lopuksi vedessä kostutetulla siivospyyhkeellä ja imeytä pinnalla oleva kosteus paperiin tai siivospyyhkeeseen.




Annostus

Tee käyttöliuos viileään veteen. Mittaa ensin vesi ja lisää sen jälkeen Oxivir Plus.

Tiivisteiden määrä: 1 litra Pitoisuus: 3,5 %. Valmista käyttöliuosta: 29 litraa

Tiivisteiden määrä: 5 litraa Pitoisuus: 3,5 %. Valmista käyttöliuosta: 143 litraa

**Tämä annostus on optimaalisten olosuhteiden mukainen, suositukset voivat vaihdella. Ota yhteyttä Diversey-edustajaasi saadaksesi lisäohjeita.*

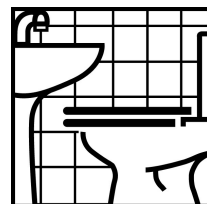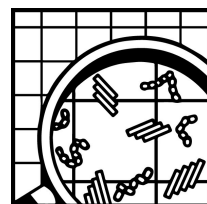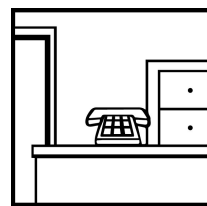

The logo for Diversey, featuring the brand name in a white serif font inside a dark blue oval shape with a stylized leaf icon to the right.

DiverseyTM

Oxivir Plus

Tekniset tiedot

pH-arvo (laimentamaton): < 2
pH-arvo (käyttöliuos): ~ 2
Suhteellinen tiheys (g/cm³; 20°C): ≈ 1.03

Yllä olevat tiedot ovat tyypillisiä normaalituotannossa. Niitä ei voi käyttää ohjearvoina.

Käyttöturvallisuus ja varastointi

Tuotteen turvalliseen käsittelymiseen ja hävittämiseen liittyvät tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta sds.diverseym.com. Vain ammattikäyttöön. Säilytys alkuperäisessä pakkauksessa suurilta lämpötilojen vaihteluilta suojattuna.

Säilyvyys: 2 vuotta

Huomioitavaa: Käytä suojakäsineitä! Ei saa käyttää marmoripinnoille. Älä sekoita toisten tuotteiden kanssa.

Mikrobiologiset tiedot

Teho viruksiin, bakteereihin, itiöihin ja hiivoihin on osoitettu EU-normien mukaisesti. Tuotteella on CE IIA -sertifiointi. Pyydä tarvittaessa testitulokset edustajaltamme.

www.diverseym.com

© 2021 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 01/12/2021 fi-FI (K00232)