

Diversey™

Oxivir Excel

Desinfiioiva puhdistusaine

Kuvaus tuotteesta

Ympäristömyönteinen ja käyttäjäturvallinen hapettava (peroksidipohjainen) puhdistus- ja desinfektioaine vettä sietävien pintojen pesuun ja desinfiointiin. Teho viruksiin, bakteereihin, itiöihin ja hiivoihin on osoitettu EU-normien mukaisesti. CE IIa-merkitty, PT2- ja PT4-hyväksyntä.

Ominaisuudet

- Teho viruksiin, bakteereihin, hiivoihin ja itiöihin on osoitettu EU-normien mukaisesti.
- Säilyvyys tiivisteinä 2 vuotta valmistuksesta.
- Puhdistaa ja desinfiioi samanaikaisesti vähentäen tarvittavaa työaikaa.
- Soveltuu laajalti erilaisiin kohteisiin terveydenhuollon vaativista olosuhteista keittiö- ja mm. kosteiden tilojen desinfiointiin.

Edut

- Turvallinen käyttäjille ja pinnoille.
- Erinomainen puhdistuskyky.
- Nopea desinfiointiteho - desinfiointi ehtii toteutua ennen pinnan kuivumista.
- Tuotteen teho todistettu EN-testein.
- Tehoa useisiin patogeeneihin mm. polio-, adeno- ja murine noro-viruksiin.
- Tehoa myös vaipallisiin viruksiin kuten HI-, HB-, HC-, influenssa-, vaccinia- ja corona-viruksiin.
- Soveltuu käytettäväksi myös terveydenhuollon korkean riskin kohteissa mukaan lukien leikkaussalit, tehosastot ja potilashuoneet.
- Soveltuu myös aroille tekstiileille, Wool Safe-hyväksyntä.




Käyttöohje

Pyyhi pinta liuokseen kostutetulla siivouspyyhkeellä tai annosteletuotetta suoraan pinnalle ja pyyhi. Anna kuivua.

Annostus

Valmista 4,5 %:nen käyttöliuos. Mittaa ensin viileä vesi (955 ml) ja sitten Oxivir Excel (45 ml).

**Tämä annostus on optimaalisten olosuhteiden mukainen, suositukset voivat vaihdella. Ota yhteyttä Diversey-edustajaasi saadaksesi lisäohjeita.*

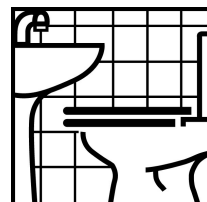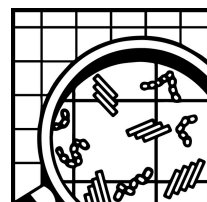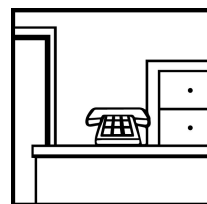

© A.I.S.E

The logo for Diversey, featuring the brand name in a white serif font inside a blue oval shape with a stylized leaf icon to the right.

DiverseyTM

Oxivir Excel

Tekniset tiedot

pH-arvo (laimentamaton): < 2
pH-arvo (käyttöliuos): < 2
Suhteellinen tiheys (g/cm³; 20°C): ≈ 1.07

Yllä olevat tiedot ovat tyypillisiä normaalituotannossa. Niitä ei voi käyttää ohjearvoina.

Käyttöturvallisuus ja varastointi

Tuotteen turvalliseen käsittelymiseen ja hävittämiseen liittyvät tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta sds.diverseym.com. Vain ammattikäyttöön. Säilytys alkuperäisessä pakkauksessa suurilta lämpötilojen vaihteluilta suojattuna.

Säilyvyys: tiivisteinä 2 vuotta valmistuspäivästä

Huomioitavaa: Älä käytä muiden kemikaalien kanssa. Ei saa käyttää pinnoille, jotka eivät siedä vettä tai happamia aineita. Esim marmori. Käytä suojakäsineitä.

Mikrobiologiset tiedot

Teho viruksiin, bakteereihin, itiöihin ja hiivoihin on osoitettu EU-normien mukaisesti. Tuotteella on CE IIA -sertifiointi. Pyydä tarvittaessa testitulokset edustajaltamme.

www.diverseym.com

© 2021 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 01/12/2021 fi-FI (K00259)