

# Desinfektol® T

## Etanolipohjainen monikäyttödesinfektioaine

EN 13697 • EN 13727 • EN 14476 (noro) • EN 14561



Desinfektol T on etanolipohjainen tehokas desinfektioaine pinoille ja välineille. Desinfektol T on mikrobisidisesti tehokas ja desinfektioajaltaan nopea. Tuotteen pH on neutraali. Desinfektol T ei sisällä hajusteita tai väriaineita. Desinfektol T sopii sellaisenaan kaikkien alkoholia kestävien pintojen – myös useimpien muovimateriaalien – desinfektioon kaikkialla teollisuudessa, elintarvikehygieniassa, eläinten hoidossa jne.

### Mikrobisidinen teho

Desinfektol T:n bakteri- ja sieniteho on testattu vaikeimmissa tällä hetkellä olemassa olevissa testiolosuhteissa orgaanisen lian läsnäollessa lasialustalle kiinnitetyille mikrobeille.

Tuotteella on tutkitusti hyvä mikrobisidinen teho ja se täyttää seuraavien EN-standardien vaatimukset:

- EN 13697 Kvantitatiivinen pintatesti ei-huokoisille materiaaleille bakterisidisen ja/tai fungisidisen tehon osoittamiseksi ilman mekaanista hankausta (faasi 2/vaihe 2)
- EN 13727 Kvantitatiivinen suspensiotesti bakterisidisen tehon osoittamiseksi terveydenhuollossa (faasi 2/vaihe 1)
- EN 14561 Kvantitatiivinen carrier-testi bakterisidisen tehon osoittamiseksi instrumenttien desinfektioon terveydenhuollossa (faasi 2/vaihe 1)
- EN 14476 Kvantitatiivinen suspensiotesti virusidisen tehon osoittamiseksi terveydenhuollossa (faasi 2/vaihe 1)

### Käyttöohje

Välineet voidaan desinfioida kosteapyyhinnällä tai upottamalla. Kostuta kertakäyttöpyyhe Desinfektol T:llä ja pyyhi desinfioitava väline huolellisesti. Huomioi pyyhkeen riittävä kosteus. Jos pyyhe tuntuu kuivalta, etanoli on haihtunut eikä tehoa. Uputusdesinfektioaika 5 minuuttia. Näkyvästi likaiset välineet tai välineet, joissa on kuivunutta likaa, on esipestävää ennen Desinfektol T:llä käsittelyä. Jälkihuuhtelu tapauskohtaisesti.

### Pakkaus ja ympäristö

Pakkaukset ovat kestävää PE-HD -muovia ja 100 ml pullo PET-muovia, jotka ovat ympäristöystävällisiä, kierrätyskelpoisia ja poltettavia materiaaleja. Pumpupullon pumppu hävitetään sekajätteeseen sen sisältämän metallin takia. Pakkausten ja valmisteen yhteensopivuus on laatuvarmennettu. Tuotteen kaikki ainesosat ovat biologisesti hajoavia.

### Säilyvyys ja kelpoisuus aika

Huoneenlämmössä 5 vuotta suljettuna ja avaamisen jälkeen 2 vuotta.

### Turvallisuus

Helposti syttyvä neste ja höyry. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Säilytä tiiviisti suljettuna. Jos kemikaalia joutuu silmiin, huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Säilytettävä pystyasennossa.

### Alkuperämaa

Suomi

### Koostumus

Etanoli 70 p-%/76,9 t-%  
Desinfiointivoimaa lisääksi:  
Alkyyliidimetyyliammoniumkloridi  
Aqua ad 100 %

pH n. 7,0

### Desinfektol T 5 litraa

Tuotenumero: 13240142  
Myyntierä: 3 kpl  
Lava: 108 kpl  
GTIN vähittäistuote: 6414504608855  
GTIN kuljetuspakkaus: 6414504608848

20220131