




# Erinox

## Erikoispesuaine

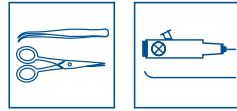

Erikoispesuaine terveydenhuollon ja hammashuollon instrumenttien ja välineistön käsinpesuun, ultraäänipesulaitteisiin sekä endoskooppien pesuun.

### Käyttökohteet

Ultraäänipesulaitteisiin, endoskooppien esipesuun, instrumenteille, hoitovälineistölle, laboratoriovälineille, herkälle lasitavaralle. Lääkinnällinen laite. Ammattikäyttöön.

### Tuot ominaisuudet

Irrottaa tehokkaasti epäpuhtauksia ja rasvalikaa. Se sopii hyvin myös herkkien materiaalien puhdistukseen. Matalavaahtoinen erikoispesuaine instrumenttien ja hoitovälineistön puhdistukseen manuaalisesti ja ultraäänipesulaitteissa.

### Käyttö- ja annostusohje

Valmista ohjeen mukainen käyttölaimennos. Liuos vaihdetaan päivittäin. Käsin suoritettavassa puhdistuksessa käyttölaimennos tehdään jokaista huoltotoimenpidettä varten erikseen. Pestyt välineet huuhdellaan ja kuivataan. Aseta välineet väljästi ultraäänipesulaitteeseen, pesulämpötila likatyypistä riippuen max. 50 °C. Huuhtelee välineet pesun jälkeen. Tarvittaessa desinfioi välineet ennen pesua.

### Erinox käyttö- ja laimennos ohjeet

	%	Erinox	Vesi	Huom!
Ultraäänipesulaitteet	1 % - 2 %	10 ml 20 ml	1 l 1 l	vaihda laimennos 1-2 x pv esiliotus tarvittaessa 2 %
Käsin suoritettava pesu				
- endoskoopit	2 %	20 ml	1 l	
- muu välineistö	1- 2 %	10- 20 ml	1 l	
Peruspesu/vaikea lika	5%	50 ml	0,95l	

### Huomioitavaa

Tarvittaessa desinfioi välineet ennen pesua. Vaihda käyttölaimennos päivittäin. Käsin suoritettavassa pesussa tee käyttölaimennos jokaista huoltotoimenpidettä varten erikseen.

### Koostumus

Tehoaine		Vaikutus
Ionittomia tensidejä	< 5%	pesuteho
Polykarboksylaattia	<5%	dispergoi likaa, kompleksinmuodostaja

### Tuotteen pH

10.0 heikosti emäksinen

<b>Käyttöliuoksen pH</b>	10.0 heikosti emäksinen
<b>Ulkonäkö ja tuoksu</b>	Kirkas neste
<b>Valmistusmaa</b>	SUOMI
<b>Käyttö- ja ympäristöturvallisuus</b>	Erinox erikoispesuaineeseen liittyvistä mahdollisista vakavista vaaratilanteista tulee ilmoittaa valmistajalle asiakaspalvelu@kiilto.com ja lääkinällisistä laitteista vastaavalle viranomaiselle (Suomessa Fimea).  Lue käyttö- ja suojausohjeet käyttöturvallisuustiedotteesta. Helposti biologisesti hajoava.

<b>Pakkauskoko / Tuotekoodi</b>	<b>Myyntierä</b>	<b>Tuotekoodi</b>	<b>GTIN</b>	<b>Myyntierän GTIN</b>
6 x 1 l		8113	6417964081138	6417964483536
3 x 5 l		8114	6417964081145	6417964483543
1 x 200 l		8148	6417964081480	



<b>Lisätietoja</b>	Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme <a href="http://www.kiilto.fi">www.kiilto.fi</a> tai asiakaspalvelustamme e-mail <a href="mailto:asiakaspalvelu@kiilto.com">asiakaspalvelu@kiilto.com</a> .
--------------------	--