




Deko

Terveysthuollon konepesuaine

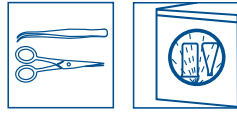

Voimakkaasti emäksinen, vaahtoamaton konepesuaine terveydenhuollon instrumenttien ja välineiden sekä laboratoriovälineistön pesuun.

Käyttökohteet

Pesu- ja desinfiointikoneet laboratorioissa ja osastoilla. Emäksisyyttä sietävälle välineistölle.

Lääkinnällinen laite. Ammattikäyttöön.

Tuoteminaisuudet

Voimakkaasti emäksinen, vaahtoamaton konepesuaine kaikkiin huuhtelu- ja desinfektioilaitteisiin. Pesee erittäin hyvin myös kovissa vesissä. Emulgoi tehokkaasti likaa, rasvaa ja valkuaista. Hyvä huuhtoutuvuus mahdollistaa tuotteen käytön myös vaativissa laboratorio-olosuhteissa.

Käyttö- ja annostusohje

Liitä kanisteri pesukoneen automaattiannostelijaan. Ohjeellinen annostus huuhtelu- ja pesu-desinfektioilaitteissa on 0,1 - 1 % (1 -10 ml /1 L vettä, 20 - 70 ml/ pesu), pesulämpötila 45-80°C. Annostukseen vaikuttavat pestävä materiaali ja veden laatu. Kone lämpödesinfioi puhdistetut ja huuhtotut instrumentit sekä kammion valitun pesuohjelman mukaisesti.

Huomioitavaa

Huomioi laitteen täytössä, että vesisuihkut pääsevät pestävien välineiden kaikille pinnoille. Aseta pestävä välineistö väljästi koneeseen. Käytä tarvittaessa erikoistelineitä. Laitteen moitteeton toiminta on tarkistettava määräajoin turvallisen lopputuloksen saavuttamiseksi.

Noudata laitevalmistajien erikoisohjeistuksia.

Koostumus

Tehoaine		Vaikutus
Kaliumhydroksidia	5 - 15 %	emäs, pesuteho
MGDA	15-30 %	sitoo veden kovuustekijöitä
Fosfonaatteja	< 5 %	pehmentää vettä, dispergoi likaa, nopeuttaa huuhtoutuvuutta

Tuotteen pH

13.5 vahvasti emäksinen

Käyttöliuoksen pH

12.1 vahvasti emäksinen

Ulkonäkö ja tuoksu

Kirkas neste

Valmistusmaa

SUOMI

**Käyttö- ja ympäristö-
turvallisuus**

Deko konepesuaineeseen liittyvistä mahdollisista vakavista vaaratilanteista tulee ilmoittaa valmistajalle asiakaspalvelu@kiilto.com ja lääkinnällisistä laitteista vastaavalle viranomaiselle (Suomessa Fimea).

Lue käyttö- ja suojausohjeet käyttöturvallisuustiedotteesta.

**Pakkauskoko /
Tuotekoodi**

Myyntierä	Tuotekoodi	GTIN	Myyntierän GTIN
3 x 5 l	8143	6417964081435	6417964482386

**Lisätietoja**

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiilto.fi tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiilto.com.