




Hydragel

Esikäsittelyaine

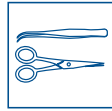

Lian kiinni kuivumista sekä mikrobien lisääntymistä ja leviämistä estävä esikäsittelyaine instrumenteille.

Käyttökohteet

Esikäsittelytuote tilanteisiin, joissa instrumentteja ei pestä välittömästi käytön jälkeen. Hydragel estää orgaanisen lian kiinnittymisen ja kuivumisen sekä mikrobien lisääntymisen käytetyissä instrumenteissa.

Lääkinnällinen laite. Ammattikäyttöön.

Tuot ominaisuudet

Helposti levittyvä geelimäinen suihke muodostaa instrumenttien pinnalle mikrobeja läpäisemättömän pinnan. Geelikalvo estää lian kuivumisen kiinni instrumentteihin sekä mikrobien lisääntymisen ja leviämisen. Vaikutus kestää 5 vrk. Tuotetta voidaan käyttää tarvittaessa myös pesutehosteena hankalasti puhdistuville instrumenteille. Sopii yleisesti käytössä oleville materiaaleille. Hydragel on vesiliukoinen ja huuhtoutuu hyvin instrumenttien pinnalta.

Käyttö- ja annostusohje

Käytä kannellista säilytys/kuljetuslaatikkoa. Sumuta esikäsittelyainetta kuljetuslaatikossa olevien instrumenttien päälle. Noudata turvallisia työtapoja instrumenttien säilytyksen ja kuljetuksen aikana. Pese instrumentit normaaliin tapaan.

Huomioitavaa

Esikäsittelyaineen alle ei saa jäädä kemikaaleja, jotka voivat syövyttää tai vaurioittaa metalleja. Noudata laitevalmistajien erikoisohjeistuksia. Puhdista roiskeet vedellä. Lue käyttö- ja suojausohjeet käyttöturvallisuustiedotteesta.

Koostumus

Tehoaine

Rasvahappojen
alkanoliaminosuoloja 5 - 15%

Ionittomia tensidejä < 5%

2-fenoksietanoli

Korroosionestoainetta

Vaahdonestoainetta

Tuotteen pH

9.0 heikosti emäksinen

Varastointi

<28°C. Säilyy 3 v. valmistusajankohdasta.

Valmistusmaa

SUOMI

**Käyttö- ja ympäristö-
turvallisuus**

Hydragel esikäsitteilyaineeseen liittyvistä mahdollisista vakavista vaaratilanteista tulee ilmoittaa valmistajalle asiakaspalvelu@kiilto.com ja lääkinnällisistä laitteista vastaavalle viranomaiselle (Suomessa Fimea).

Tuote on biologisesti hajoava. Raaka-aineet ovat ympäristömyötäisiä. Pakkaukset valmistetaan PE-HD -muovista, joka on ympäristömyötäinen, täysin kierrätyskelpoinen ja poltettava materiaali.

**Pakkauskoko /
Tuotekoodi**

Myyntierä	Tuotekoodi	GTIN	Myyntierän GTIN
6 x 750 ml	8222	6417964082227	6417964482959

**Lisätietoja**

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiilto.fi tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiilto.com.