

HYALO⁴ SILVERSPRAY



HELPPOKÄYTTÖINEN SUIHKE, JOKA EDISTÄÄ PARANEMISTA JA SUOJAA MIKROBEILTA



Luokka IIa
Lääkinnällinen
laite

CE 0051

Hyaluronihapon natriumsuola 0,25 %
Ag (metallihopea)
E-vitamiini

Jauhesuihke | 125 ml:n pullo iholle käytettäväksi

TUKEE PARANEMISTA JA TORJUU MIKROBEJA

INDIKAATIOT

Ei-tulehtuneiden ihovaurioiden hoito (eli naarmut, hiertymät, halkeileva iho, leikkaushaavat, pienet kirurgiset haavat, paikalliset ensimmäisen ja toisen asteen palovammat), diabeettisen jalan, urheilijan jalan ja painehaavojen hoito⁽¹⁾.



NAARMUT/HIERTYMÄT



HAAVAT



PAIKALLISET ENSIMMÄISEN JA TOISEN ASTEEN PALOVAMMAT



DIABEETTISET JALKAHAAVAT



PAINEHAAVAT



PIENET KIRURGISET HAAVAT

KOOSTUMUS⁽¹⁾

HYALURONIHAPPO – PÄÄAINESOSA (molekyylipaino 200 kDa)

METALLIHOPEA

● Yhdistetty kaoliinin ja tärkkelyksen matriisiin⁽¹⁾

E-VITAMIINI

● Antioksidanttinen ja kalvoa muodostava vaikutus tukee hyaluronihapon kosteuttavaa tehoa ja edistää siten ihon uusiutumisosprosessia⁽²⁾


KAOLIINI

● Kaoliini on alumiinisilikaatti, joka voi indusoida ja nopeuttaa veren hyytymistä imemällä nopeasti vettä vuotokohdassa olevasta verestä⁽²⁾


HYALO⁴ SILVERSPRAY




HYALURONIHAPPO

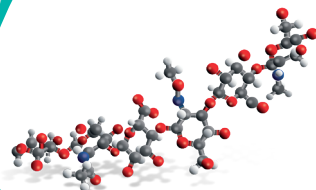

METALLIHOPEA

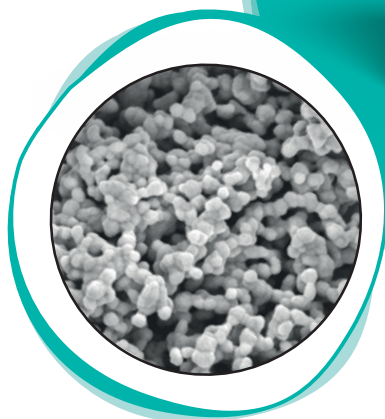

E-VITAMIINI

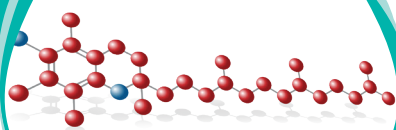

PÄÄAINESOSA

HYALURONI- HAPPO

Luo kostean mikroympäristön, joka edistää kudoksen spontaania uudistumista

MUUT AINESOSAT

METALLIHOPEA

RIISILESEÖLJY

KAOLIINI JA
MAISSITÄRKKELYS

TERPINEOLI

E-VITAMIINI

DISILOKSAANI



fidia

SKIN
CARE

HYALO⁴ SILVERSPRAY

HYÖDYT

- Jauhemainen suspensiosuihke kiinnittyy vauriokohtaan ilman dispersioita ja muodostaa bakteereilta suojaavan kerroksen.
- Imee eritteitä



HELPPOKÄYTTÖINEN:

- Puhdista haavauma ennen suihkeen käyttöä.
- Ravista pulloa hyvin 15–20 sekunnin ajan ennen käyttöä.
- Pidä pullo pystysuorassa ja suihkuta noin 15 cm:n etäisyydeltä niin paljon suihketta, että se peittää käsiteltävän pinnan.
- Suosittellemme, että lääkitty osa peitetään steriilillä sideharsolla.
- Levitä kerran tai kahdesti päivässä kliinisen tilan mukaan.
- Tuote on helppo poistaa puhdistamalla haava suolaliuoksella.

Helppokäyttöinen suihke, joka edistää haavan paranemista ja suojaa mikrobeilta.

LÄHTEET:

- HYALO4 SILVERSPRAY, Instructi on for use; 2. Shahrin Z, et al. Palm Tocotrienol: A Good Anti oxidant for Skin Wound Healing. Palm Oil Developments 2016;64:14-19;
- Elsababy M. et al., Design and Preclinical Evaluati on of Chitosan/Kaolin Nanocomposites with Enhanced Hemostati c Efficiency. Mar. Drugs 2021, 19, 50: 1-16.

SÄILYTYS Säilytä +5...+30 °C:n lämpötilassa.

BERNER

**HUOMISEN
PUOLUSTAJA**
Yli 100 vuoden
kokemuksella

www.bernermedlab.fi

COD: 99002786